



VIỆT NAM  
**N.K.LUCK**  
CUNG CẤP THIẾT BỊ - VẬT LIỆU - DƯỢC PHẨM NGÀNH NHA KHOA



**DENTAL**



**Hệ Thống Mũi Mài - Hoàn Tất - Đánh Bóng**  
Dành cho Lâm Sàng và Labo

made  
in  
Germany


## Mũi Mài cho Sứ, Kim Loại và Vật Liệu có Độ Cứng Cao

### EVE DIASYNT PLUS

Mũi mài được sản xuất với công nghệ cao có các hạt kim cương dùng cho sứ, đặc biệt là sứ oxide. Nhờ thành phần có các hạt kim cương chịu được nhiệt độ cao nên mũi mài Diasynt Plus được sử dụng cho nhiều loại vật liệu có độ cứng cao như Zirconia và oxide nhôm mà những vật liệu mài trước đây không đạt được. Diasynt Plus lấy đi những vật liệu dư nhanh chóng với sự sinh nhiệt rất thấp do đó không ảnh hưởng đến chất lượng vật liệu được mài và không tạo ra những đường vi nứt trên sản phẩm.

#### Mài vật liệu dư

Kích thước hạt: thô  
rec. RPM: 8.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>; max.: 25.000 min<sup>-1</sup>

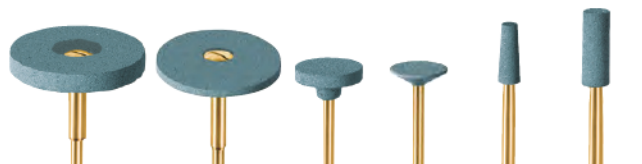

Pack.:  
1, 10 pieces

Item:	DYP-22/4g	DYP-22/2g	DYP-8g	DYP-9g	DYP-13g	DYP-14g	DYP-22/4m	DYP-22/2m	DYP-8m	DYP-9m	DYP-13m	DYP-14m
Item No.:	8000	8002	8048	8049	8053	8054	8100	8102	8148	8149	8153	8154
Sizes (mm):	22 x 4	22 x 2	12 x 2	11,5 x 3	4 x 10	5 x 13	22 x 4	22 x 2	12 x 2	11,5 x 3	4 x 10	5 x 13

#### Mài hoàn tất

Kích thước hạt: vừa  
rec. RPM: 8.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



## Hệ Thống Đánh Bóng Kim Cương dùng cho Sứ Oxide

### EVE DIACERA

Hệ thống đánh bóng 2 bước bằng kim cương cho sứ, đặc biệt cho phục hình CAD/CAM và sứ oxide. Những mũi này rất thích hợp để mài chỉnh những phục hình trên ghế như inlays, onlays, veneer và mão. Nhờ có độ bền cao và khả năng lấy đi những vật liệu dư giúp tiến trình đánh bóng nhanh chóng và hiệu quả chỉ trong vài giây. Đối với những bề mặt còn thô nhám nhiều hãy dùng mũi mài EVE Diasynt Plus trước khi dùng mũi đánh bóng Diacera.

#### Làm nhẵn

Kích thước hạt: vừa  
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



Pack.:  
1, 10 pieces

Item:	SL20DCmf	H2DCmf	H8DCmf	SL20DC	H2DC	H8DC
Item No.:	7601	7642	7648	7701	7742	7748
Sizes (mm):	20 x 1	4 x 13	11 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2

#### Đánh bóng

Kích thước hạt: mịn  
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



## Mũi Silicone Đánh Bóng dùng cho Sứ

### EVE ECO CERAM

Hệ thống mũi silicone đánh bóng 3 bước (hoàn tất, làm nhẵn và đánh bóng) dành cho sứ.

#### Hoàn tất và tạo dạng

**EVE ECO CERAM VK, Mũi silicone lấy vật liệu dư và tạo viên cho sứ.**

Kích thước hạt: thô  
rec. RPM: 7.000 - 15.000 min<sup>-1</sup>; max.: 25.000 min<sup>-1</sup>



Pack.:  
10, 100 pieces

Item:	R22VK	LS22VK	S6VK	R22NK	LS22NK	S6NK	R22SK	LS22SK	S6SK
Item No.:	1500	1501	1516	1600	1601	1616	1700	1701	1716
Sizes (mm):	22 x 3	22 x 4	6 x 24	22 x 3	22 x 4	6 x 24	22 x 3	22 x 4	6 x 24

#### Làm nhẵn và đánh bóng sơ bộ

**EVE ECO CERAM NK, Mũi silicone làm nhẵn vật liệu sứ.**

Kích thước hạt: vừa  
rec. RPM: 7.000 - 15.000 min<sup>-1</sup>; max.: 25.000 min<sup>-1</sup>



#### Đánh bóng sau cùng

**EVE ECO CERAM SK, Mũi silicone đánh bóng sứ.**

Kích thước hạt: mịn  
rec. RPM: 7.000 - 15.000 min<sup>-1</sup>; max.: 25.000 min<sup>-1</sup>



### ECO CERAM WG Hệ thống mũi đánh bóng cho Pre-sintered Zirconia.

**MỚI**

Kích thước hạt: vừa  
rec. RPM: 4.000 - 7.000 min<sup>-1</sup>; max.: 10.000 min<sup>-1</sup>



Pack.:  
10, 100 pieces

Item:	R22m-WG	H334Km-WD	R22f-WG	H334Kf-WD
Item No.:	2800	2834	2900	2934
Sizes (mm):	22 x 3	10 x 24	22 x 3	10 x 24

Kích thước hạt: mịn  
rec. RPM: 4.000 - 7.000 min<sup>-1</sup>; max.: 10.000 min<sup>-1</sup>

### UNIVERSAL Hệ thống đánh bóng cho sứ, kim loại quý, acrylic và composite

**MỚI**

Kích thước hạt: vừa  
rec. RPM: 7.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



Pack.:  
10, 100 pieces

Item:	H1	H4	H8
Item No.:	1041	1044	1048
Sizes (mm):	5,5 x 15	5 x 16	11 x 2

# Mũi Kim Cường Đánh Bóng dùng cho Sứ và Kim Loại

**EVE DIAPOL®**

Hệ thống đánh bóng 3 bước bằng kim cương cho sứ (hoàn tất, làm nhẵn và đánh bóng). Với chất lượng vượt trội và thời gian mài chính nhanh, EVE Diapol là công cụ hiệu quả và tiết kiệm để chỉnh sửa những lỗi cuối cùng. Chất lượng cao hơn hẳn so với những hệ thống đánh bóng trước đây.

**MỚI**

## Hoàn tất và tạo dạng

**EVE DIAPOL®**, Mũi kim cương, lấy vật liệu dư và hoàn tất cho sứ và kim loại.

Kích thước hạt: thô  
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 1, 10 pieces



## Làm nhẵn

**EVE DIAPOL®**, Mũi kim cương, làm nhẵn sứ và kim loại.

Kích thước hạt: vừa  
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 1, 10 pieces



## Đánh bóng

**EVE DIAPOL®**, Mũi kim cương, đánh bóng sứ và kim loại, không cần có paste đánh bóng.

Kích thước hạt: mịn  
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 1, 10 pieces



Item:	DT-H14Dg	DT-H17Dg	H2Dg	H8Dg	DT-H14Dmf	DT-H17Dmf	H2Dmf	H8Dmf	DT-H14D	DT-H17D	H2D	H8D
Item No.:	7054	7057	7042	7048	7154	7157	7142	7148	7254	7257	7242	7248
Sizes (mm):	14 x 1,6	17 x 1,6	4 x 13	11 x 2	14 x 1,6	17 x 1,6	4 x 13	11 x 2	14 x 1,6	17 x 1,6	4 x 13	11 x 2

# Mũi Đánh Bóng dùng cho Hàm Nhựa

**EVE TECHNIK**

Hệ thống đánh bóng 3 bước gồm lấy vật liệu dư, làm nhẵn và đánh bóng cho phục hình nhựa, hàm chỉnh nha bằng nhựa acrylic.

## Hoàn tất

Kích thước hạt: thô  
rec. RPM: 5.000 - 7.000 min<sup>-1</sup>



## Làm nhẵn

Kích thước hạt: vừa  
rec. RPM: 5.000 - 7.000 min<sup>-1</sup>



## Đánh bóng

Kích thước hạt: mịn  
rec. RPM: 5.000 - 7.000 min<sup>-1</sup>



Set HP 115  
12 pieces  
Item: HP 115  
Item No.: 9044

Item:	H332K	H334K	H336K	H338	H332Km	H334Km	H336Km	H338m	H332Kf	H334Kf	H336Kf	H338f
Item No.:	2032	2034	2036	2038	2132	2134	2136	2138	2232	2234	2236	2238
Sizes (mm):	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16

# Mũi Đánh Bóng dùng cho Hộp Kim Quý, Không Quý và Mẫu Đúc

**EVEFLEX TECHNIK**

Mũi đánh bóng dùng cho hộp kim quý và không quý.

## Đánh bóng sơ bộ

Mũi dẻo dùng đánh bóng kim loại quý và không quý với độ bóng mờ.

Kích thước hạt: mịn  
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



## Đánh bóng sau cùng

Mũi dẻo đánh bóng cho kim loại quý và không quý với độ bóng cao.

Kích thước hạt: siêu mịn  
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



Pack.:  
10, 100 pieces


Item:	705	706	805	806
Item No.:	4705	4706	4805	4806
Sizes (mm):	5 x 16	5,5 x 18	5 x 16	5,5 x 18

**DIACOMP ULTRA**

Hệ thống mũi đánh bóng một bước cho composite

**MỚI**

Kích thước hạt: mịn  
rec. RPM: 3.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>

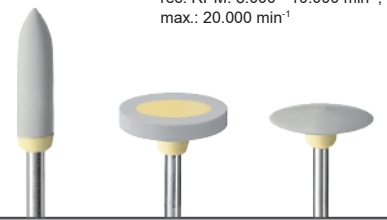

Pack.:  
1, 10 pieces

Item:	DCU-H4	DCU-H15	DCU-H16
Item No.:	6044	6055	6056
Sizes (mm):	5 x 16	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5

**EVEFLEX TWIST**

Đĩa đánh bóng dùng cho hộp kim quý và không quý. Đĩa đánh bóng linh hoạt cho phép đánh bóng mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc bề mặt của vật liệu.

rec. RPM: 8.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>;  
max.: 15.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 10, 100 pieces



Siêu thô



Thô



Vừa



Mịn



Siêu mịn

Item:	ET-517	ET-617	ET-717	ET-817	ET-917
Item No.:	4517	4617	4717	4817	4917
Sizes (mm):	18 x 1,2	18 x 1,2	18 x 1,2	18 x 1,2	18 x 1,2

# Mũi Đánh Bóng dùng cho Composite



**GỌI ĐẶT HÀNG**  
(028) 3862 0090 - 5412 2662

## EVE ECOCOMP

Hệ thống đánh bóng 2 bước cho vật liệu composite với độ mịn và độ bóng kéo dài.

### Làm nhẵn và đánh bóng sơ bộ

Kích thước hạt: vừa  
rec. RPM: 7.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 10, 100 pieces



Item:	EC2km	EC6m	EC7m	EC18m	EC2kf	EC6f	EC7f	EC18f
Item No.:	5172	5176	5177	5188	5272	5276	5277	5288
Sizes (mm):	3 x 6	10 x 0,7	5 x 10	10 x 2,5	3 x 6	10 x 0,7	5 x 10	10 x 2,5

### Đánh bóng

Kích thước hạt: mịn  
rec. RPM: 7.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 10, 100 pieces



**Set RA 210**  
8 pieces  
EC2Km, EC3Km,  
EC7m, EC18m,  
EC2Kf, EC3Kf,  
EC7f, EC18f  
Item: RA 210  
Item No.: 9071

## EVE COMPOSOF

Hệ thống đánh bóng 3 bước bằng silicone mềm và mịn cho tất cả các loại composite.

### Làm nhẵn và đánh bóng sơ bộ

Kích thước hạt: vừa  
rec. RPM: 5.000 - 8.000 min<sup>-1</sup>;  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 10, 100 pieces



Item:	CS11m	CS2Bm	CS7m	CS9m	CS11f	CS2Bf	CS7f	CS9f
Item No.:	2681	2692	2677	2679	2781	2792	2777	2779
Sizes (mm):	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5

### Đánh bóng

Kích thước hạt: mịn  
rec. RPM: 5.000 - 8.000 min<sup>-1</sup>;  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 10, 100 pieces



**Set RA 128**  
8 pieces  
CS11m, CS11f,  
CS2Bm, CS2Bf,  
CS7m, CS7f,  
CS9m, CS9f  
Item: RA 128  
Item No.: 9072

# Mũi Kim Cương Đánh Bóng dùng cho Composite

## DIACOMP ULTRA

Hệ thống mũi đánh bóng một bước cho composite

**MỚI**

Kích thước hạt: mịn  
rec. RPM: 3.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>;  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>

Pack.:  
1, 10 pieces



Item:	DCU-W11	DCU1	DCU2	DCU3
Item No.:	6081	6071	6072	6073
Sizes (mm):	3 x 7,5	14 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5



**Set RA 350**  
4 pieces  
DCU-W11, DCU1, DCU2, DCU3  
Item: RA 350  
Item No.: 9074

## EVE DIACOMP® PLUS

Bộ mũi đánh bóng bằng kim cương dùng cho composite (2 bước)



**Set RA 341**  
8 pieces  
DCP-W11m, DCP1m, DCP2m, DCP3m,  
DCP-W11f, DCP1f, DCP2f, DCP3f  
Item: RA 341  
Item No.: 9073

## EVE UNIVERSAL

Hệ thống mũi silicone dùng cho đánh bóng sứ, composite, kim loại quý và Amalgam

**MỚI**

Kích thước hạt: vừa  
rec. RPM: 7.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>;  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 10, 100 pieces



Item:	W11	W1	W2B	W5	W7
Item No.:	1081	1071	1092	1075	1077
Sizes (mm):	3 x 7,5	5,5 x 15	5 x 10	9 x 8,5	7 x 10

## EVE PROPHYCLEAN®

Dùng để lấy vôi răng, mảng bám, vết dính, keo gắn mắc cài dư, cement gắn dư. Dễ dàng đánh bóng ở vùng kẽ răng, chân răng và không làm tổn thương men răng.

Kích thước hạt: vừa  
rec. RPM: 5.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 1, 10 pieces



Item:	PC-100
Item No.:	8800
Sizes (mm):	2,35 x 9

# Mũi Kim Cương Đánh Bóng dùng cho Sứ và Kim Loại

## EVE DIAPOL®

Hệ thống đánh bóng 3 bước bằng kim cương cho sứ (hoàn tất, làm nhẵn và đánh bóng). Với chất lượng vượt trội và thời gian mài chỉnh nhanh, EVE Diapol là công cụ hiệu quả và tiết kiệm để chỉnh sửa những lỗi cuối cùng. Chất lượng cao hơn hẳn so với những hệ thống đánh bóng trước đây.

### Hoàn tất và tạo dạng

EVE DIAPOL®, Mũi kim cương, lấy vật liệu dư và hoàn tất cho sứ và kim loại.

Kích thước hạt: thô



rec. RPM:  
7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>;  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 1, 10 pieces

### Làm nhẵn

EVE DIAPOL®, Mũi kim cương, làm nhẵn sứ và kim loại.

Kích thước hạt: vừa




### Đánh bóng

EVE DIAPOL®, Mũi kim cương, đánh bóng sứ và kim loại, không cần có paste đánh bóng.

Kích thước hạt: mịn



Item:	DT-W14Dg	W16Dg	W17Dg	W18Dg	DT-W14Dmf	W16Dmf	W17Dmf	W18Dmf	DT-W14D	W11D	W16D	W17D	W18D
Item No.:	7084	7086	7087	7088	7184	7186	7187	7188	7284	7281	7286	7287	7288
Sizes (mm):	14 x 1,6	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	14 x 1,6	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5

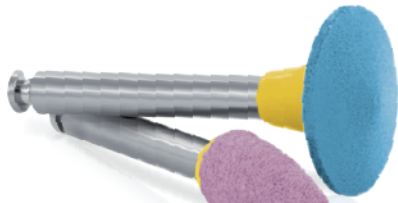

Set RA 306  
6 pieces  
Item: RA 306  
Item No.: 9088



Set RA 305  
9 pieces  
Item: RA 305  
Item No.: 9077

# Mũi Silicone Đánh Bóng dùng cho Sứ

## EVE ECOCERAM

Hệ thống mũi silicone đánh bóng 3 bước (hoàn tất, làm nhẵn và đánh bóng) dành cho sứ.

### Hoàn tất và tạo dạng

EVE ECOCERAM VK, Mũi silicone lấy vật liệu dư và tạo viền cho sứ.

Kích thước hạt: thô



rec. RPM:  
7.000 - 15.000 min<sup>-1</sup>;  
max.: 25.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 10, 100 pieces

### Làm nhẵn và đánh bóng sơ bộ

EVE ECOCERAM NK, Mũi silicone làm nhẵn vật liệu sứ.

Kích thước hạt: vừa



### Đánh bóng sau cùng

EVE ECOCERAM SK, Mũi silicone đánh bóng sứ.

Kích thước hạt: mịn



Item:	W2BVK	W7VK	W2BNK	W7NK	W2BSK	W7SK
Item No.:	1592	1577	1692	1677	1792	1777
Sizes (mm):	5 x 10	7 x 10	5 x 10	7 x 10	5 x 10	7 x 10

## EVE BRACKET

Dùng loại bỏ composite gắn mắc cài mà không làm tổn thương men răng.

Kích thước hạt: thô  
rec. RPM: 5.000 - 7.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 10, 100 pieces



Item:	BR11	BR7
Item No.:	5381	5377
Sizes (mm):	3 x 7,5	5 x 10

# Mũi Mài và Mũi Đánh Bóng bằng Kim Cương dùng cho Zirconia

Hệ thống đánh bóng 2 bước bằng kim cương cho sứ, đặc biệt cho phục hình CAD/CAM và sứ oxide. Những mũi này rất thích hợp để mài chỉnh những phục hình trên ghế như inlays, onlays, veneer và mão. Nhờ có độ bền cao và khả năng lấy đi những vật liệu dư giúp tiến trình đánh bóng nhanh chóng và hiệu quả chỉ trong vài giây. Đối với những bề mặt còn thô nhám nhiều hãy dùng mũi mài EVE Diasynt Plus trước khi dùng mũi đánh bóng Diacera.

## EVE DIASynt PLUS

### Mài vật liệu dư

Mũi kim cương bỏ vật liệu dư cho sứ, kim loại, đặc biệt là sứ oxide mà không gây nóng.

rec. RPM: 8.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>;  
max.: 25.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 1, 10 pieces



Kích thước hạt: thô      Kích thước hạt: vừa

## EVE DIACERA

### Làm nhẵn và đánh bóng sơ bộ

Mũi kim cương, làm nhẵn và đánh bóng sơ bộ cho sứ, đặc biệt là sứ oxide.

Kích thước hạt: vừa  
rec. RPM: 7.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 1, 10 pieces



### Đánh bóng sau cùng

Mũi kim cương, đánh bóng sứ và sứ oxide với độ bóng cao.

Kích thước hạt: mịn  
rec. RPM: 7.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 1, 10 pieces



Set RA 322  
8 pieces  
DYP-W13g, DYP-W9g,  
W16DCmf, W17DCmf,  
W18DCmf, W16DC,  
W17DC, W18DC  
Item: RA 322  
Item No.: 9078

Item:	DYP-W9g	DYP-W13g	DYP-W9m	DYP-W13m	W16DCmf	W17DCmf	W18DCmf	W16DC	W17DC	W18DC
Item No.:	8079	8083	8179	8183	7686	7687	7688	7786	7787	7788
Sizes (mm):	11,5 x 3	4 x 10	11,5 x 3	4 x 10	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5

# Mũi Đánh Bóng dùng cho Kim Loại Quý, Bán Quý, Amalgam

Hệ thống đánh bóng 3 bước (mài thô, làm nhẵn và đánh bóng) cho kim loại quý, bán quý, amalgam. Hệ thống này thích hợp cho những kim loại từ mềm cho đến cứng vừa như hợp kim amalgam và vàng. Hợp chất carbon silicone này được phủ ngoài bằng cao su tổng hợp.

## EVEFLEX



**Set RA 209**  
9 pieces  
AF2K, AF7, AF3K,  
BV2K, BV7, BV3K,  
GH2K, GH7, GH3K  
Item: RA 209  
Item No.: 9075

### Hoàn tất

Mài hoàn tất cho amalgam và vàng.

Kích thước hạt: thô  
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 10, 100 pieces



### Làm nhẵn và đánh bóng sơ bộ

Làm nhẵn và đánh bóng sơ bộ cho vàng, amalgam và composite.

Kích thước hạt: vừa  
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 10, 100 pieces



### Đánh bóng sau cùng

Làm bóng láng cho vàng, amalgam và composite.

Kích thước hạt: mịn  
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>; max.: 20.000 min<sup>-1</sup>  
Pack.: 10, 100 pieces



Item:	ET-AF14	AF2K	AF3K	ET-BV14	BV2K	BV3K	ET-GH14	GH11	GH2K	GH1	GH3K
Item No.:	4684	4672	4673	4784	4772	4773	4884	4881	4872	4871	4873
Sizes (mm):	14 x 1,6	3 x 6	6,5 x 9,5	14 x 1,6	3 x 6	6,5 x 9,5	14 x 1,6	3 x 7,5	3 x 6	4 x 12	6,5 x 9,5



Item:	AF5W	AF7	BV5W	BV7	BV13	B2	B3	GH5W	GH7
Item No.:	4675	4677	4775	4777	4783	4792	4793	4875	4877
Sizes (mm):	9 x 8	5 x 10	9 x 8	5 x 10	5,5 x 16	3 x 6,5	6 x 8	9 x 8	5 x 10

## ECOCHROM Mũi đánh bóng dùng cho hợp kim quý và không quý

**MỚI**

Kích thước hạt: thô  
rec. RPM: 8.000 - 15.000 min<sup>-1</sup>;  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>

Pack.:  
10, 100 pieces




Item:	ECR-R22	ECR-L22	ECR-C6
Item No.:	4200	4201	4217
Sizes (mm):	22 x 3	22 x 4	6 x 22

## Chén Trộn

### PLUS

Dùng để trộn thạch cao, alginate và các vật liệu khác.

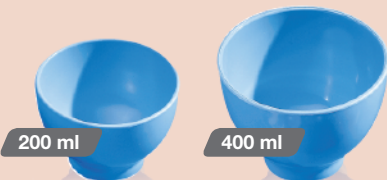

### MIX

Chén trộn bằng silicon trong suốt giúp cho việc trộn nhựa tự cứng được dễ dàng.



Item:	PLUS200	PLUS400	MIX5	MIX25
Item No.:	9600	9601	9620	9621

## EVE Mandrels

Trục lắp bằng thép không gỉ có độ chính xác cao.

Pack.: 3, 10, 100 pieces

Item:	95RA	76RA
Item No.:	9595	9576
Screw head - Ø(mm):		5

Item:	61HP	78HP
Item No.:	9551	9553
Screw head - Ø(mm):	-	5

## Chổi Đánh Bóng

### UNIBRUSH

rec. RPM: 5.000 - 7.000 min<sup>-1</sup>

max. 10.000 min<sup>-1</sup>

Pack.: 10, 100 pieces

**MỚI**



Item:	WTO6
Item No.:	B826
Sizes (mm):	6 x 5,5

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC



VIỆT NAM  
**N.K.LUCK**  
www.nkluck.vn | contact@nkluck.com

Showroom - Trung Tâm CSKH: K0.01, Đường B-Bắc, Khu Phố Star Hill,  
Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh  
Tel: (028) 5412 2662 - 5412 2882

Cửa Hàng: 781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh  
Tel: (028) 3862 0090 - 3863 4172

Showroom Đà Nẵng: P. 102 - Soho Building Đà Nẵng,  
27-29 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng  
Tel: (0236) 398 1889 - 0918 097 798

Showroom Hà Nội: Lầu 4, Tòa nhà Bắc Á,  
09 Đào Duy Anh, P. Phương Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội  
Tel: 0918 893 798 - 0911 229 028

